

印字装置(オプション)

散剤・錠剤・顆粒など多種類の投薬では服薬指導が大切です。飲み忘れや誤飲を防止するため、患者名・服薬情報・担当科名など、患者さんへのきめ細かい服薬情報を分包紙に自動印字します。

EPS(パソコン入力)

100種類の印字レイアウトが設定できキャラクター、薬品名、反転印字(黒地に白文字)も可能です。



※パソコンのモデルおよび仕様は、写真と異なる場合があります。

EPS(パソコン入力)仕様

印字内容(選択)	●患者ID ●患者名(漢字、ひらがな、カタカナ) ●病棟/担当科 ●病室No ●調剤(調剤時間調剤時) ●印字キャラクター151種類を登録、自由登録で毎包200種類 ●薬品名 ●日付(カウントアップ選択可) ●コメント12 ●施設情報(名称・住所・連絡先)
表示機能	パソコンディスプレイ(LCD) カラー
印字方式	熱転写
印字パターン	くり返し、連続
印字方向/位置	縦・横/自由選択
印字サイズ	全角～最大100倍角(1行全角16文字まで)
印字範囲	横60×縦54mm
印字予約数	100件分
患者登録数	200,000件
処方パターン	15パターン
分包紙幅	70mm、80mm

AX-21仕様

外形寸法	幅708×奥行374×高さ880mm
重量	約60kg(プリンタ取付時)
電源	AC100V±10V50/60Hz±1Hz
消費電力	約1000VA MAX(プリンタ取付時)
分包数	1～21包/回、連続
分包速度	標準:40包/分、低速:30包/分
1包当り	少量:70×70mm、標準:70×80mm
適用分包紙	グラシン70WI 330、セロホリ70WI 250PE30 ペポリ70WI 250(プリンタなしモデルに限る)
オプション	印字装置、入力装置、入力装置設置台

安心のメンテナンス契約 分包機を快適にご利用いただくために、弊社では保守点検のメンテナンス契約をお奨めしております。

ご注意! 消耗品は、キヤノンライフケアソリューションズ推奨の純製品をご使用ください。

○写真はカタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、外觀・仕様は改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文、お問い合わせは下記へどうぞ

正確で適切な服薬情報を簡単操作で、わかりやすく分包紙に印字します。

- 簡単操作で、患者の印字内容を登録。
- 見やすい画面で、確認も容易です。
- スピーディーに印字します。




●印字パターン(患者さんの服薬に合わせてセットできます。)




操作ディスプレイ

印字機能が1画面で設定できます。空白に患者コード・患者名・薬品名・調剤日を印字できるので、患者ごとの監査がやりやすくなります。

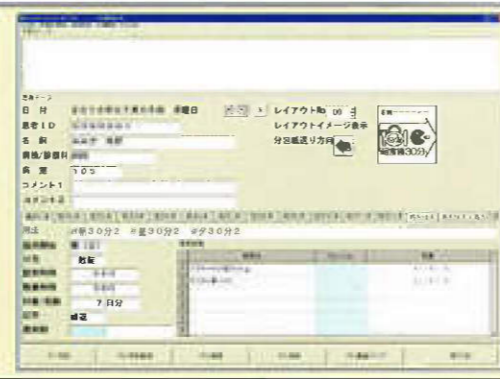

AX-21外形寸法図(単位/mm)

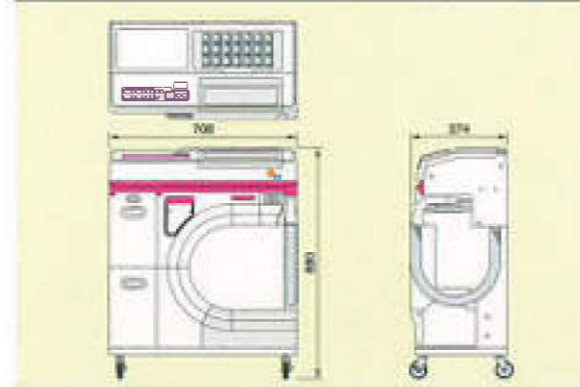

薬剤自動分割分包機

AX-21

アクス



うれしい機能がついて、さらにコンパクトに!

Canon

キヤノンライフケアソリューションズ株式会社
<http://www.canon-lcs.co.jp>

本社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目13番29号 キヤノン港南ビル (03) 6719-7040

製造販売元: キヤノンライフケアソリューションズ株式会社

薬剤自動分割分包機

AX-21

アクス

AX-21は、使う立場で設計された

こまやかな配慮がいっぱいの小型分包機です。

例えば、シール温度を自動切換えする分包紙の識別機能、

ならしへらを収納できる可愛いポケット、

散薬カバーもスッキリと収まる収納BOXなど、

毎日使うからこそ、うれしい便利な機能がたくさんあります。

また、駆動部は、耐久性に優れた直線式を継承し、

高い信頼性を確保。

高性能でありながら、コンパクトなAX-21は、

病医院や薬局など広範囲な調剤に対応します。



気の利く収納や機能を
ギュッとコンパクトに!

薬剤自動分割分包機

AX-21

アクス



警告ランプで
エラーをお知らせ

タブレット包数を
4包刻みで赤印付

シンプル構造!
掃除が簡単

二つ折り分包紙で
簡単セット

らくらく
簡単メンテナンス

小物の整理に
便利な収納BOX

警告ランプでお知らせ



大型の警告ランプが赤と緑の2色でいろいろなエラーをお知らせ。視認性が良いので離れたところからでも異常が分かります。警告音を消しても、エラーの発生を視認出来ます。診察室の近くなど、警報音の気になる場所でお使いいただく時に便利です。



正常時

紙切れ・インクリボン切れ
など軽度のエラーの場合
は"緑"に点滅

電源エラーや各部破損な
どの重大なトラブルが発
生した場合は"赤"に点滅

分4に目印

分4の調剤のためにタブレットの包数を4包目ごとに赤印を付けました。また、錠剤カバーを開けると、錠剤手置き時に飛び跳ねた錠剤が機械の後ろに落ちるのを防ぎます。



多彩な機能と使いやすさがうれしいAX-21

分包紙自動識別機能



分包紙のグラシン・セロポリ・ペポリを識別して、自動的にヒーターの温度を切り替えます。また、分包紙の巻き容量をアップし、交換の手間を軽減しました。
(グラシン紙幅少量分包で約4,700包が可能です。)



ハンドクリーナー

伸縮性に富んだホースでハンドクリーナーの収納性をアップした上に、分包作業中の取り出し、収納がしやすいように、収納部が前後にスライドします。



らくらくメンテナンス

散薬分割マス、錠剤マス、ホッパー等はワンタッチで取り外しができ、気軽に水洗いもできるため、お掃除が楽しくなるような設計です。その他、錠剤シャッターの掃除やクリーナーパックの交換等も楽に行えるように配慮されています。



コンタミ軽減

分包機内部のクリーナーにより分包中の集塵作業・分包後の集中クリーニングを行い、次の分包への残薬の混入(コンタミ)を軽減します。

二つ折り分包紙で簡単セット

分包紙は二つ折りのため、簡単にセットでき、紙ズレがありません。紙切れの場合はセンサーが感知して自動停止し、ブザーや警報ランプでお知らせします。分包紙の紙幅は操作パネルのボタンで70/80mmワンタッチ切り替えが可能です。



収納にも気配り

前面扉に「ならしへら」を収納するためのポケットを付けました。また、散薬カバーやクリーナー用紙パック等の分包機付属品を収納するための収納BOXも設けました。
(ノーマル機種とプリンタ機種では収納スペースが異なります。)



散薬分割マス

散薬分割マスにはひとマス毎にマス蓋が取付けられており、密閉性が高く粉漏れがありません。また、耐久性に優れたステンレスライドフレームにアルミ製の散薬マスがワンタッチで着脱でき、お掃除やメンテナンス性に優れているため、いつまでも清潔にご使用いただけます。



薬剤自動分割分包機

AX-21

オプション

印字装置

EPS(印字ソフト)+パソコン+熱転写プリンタ

熱転写プリンタの搭載により、患者名や用法の印字のほか、検薬印字やピクトグラムなどを印字できます。印字装置は左右どちらでも取り付け可能です。

飲み方を絵文字で印字

- 朝・昼・夕などの服用時間を通常の文字で表記するより絵文字(イラスト)で視覚的に伝えることで、患者さんの飲み間違いを防止しコンプライアンスの向上に役立ちます。
- 印字キャラクター151種類が既に登録されており、総数200種類までユーザーでも自由に登録ができます。



レイアウトフリーの熱転写プリンタ

- 熱転写プリンタの採用により、文字の大きさが最大100倍角まで印字可能です。印字範囲も1包内全体に自由にレイアウトでき、イメージ画面を見ながら簡単に設定できます。



- インクリボンの交換は、ユニット全体を手前に引き出せる構造として、専用のインクリボン装填アタッチメントでワンタッチ装着。

インクリボン消耗の軽減が可能

縦印字が可能

- 印字方向は分包紙の流れ方向に対して縦方向に印字させることにより、印字内容が少ない場合など、インクリボンの消耗を軽減します。



エコノミータイプもご用意

- 印字内容が少なくても、横方向に印字させたい場合には、インクリボンの幅を狭くしたエコノミータイプのインクリボンも用意しました。

